

## **CZ Návod k použití**

### **HK respirátorová pumpa pro telata #1032**

Respirační pumpa HK od veterinárního lékaře Dr. Brona je vhodná pro extrakci hlenů z úst a nosu novorozeneých telat a k resuscitaci mláďat oběhového systému u zvláště obtížných porodů telat.

#### **1. Odsávání hlenu z úst a nosu novorozených telat.**

Větší množství hlenu v oblasti úst a nosu může způsobit značné problémy, když tele začne dýchat, a může vést i k úmrtí udušením. Odstranění hlenu rukou je v tomto případě zcela nedostatečné. HK respirátorová pumpa je řešením. Přiložte gumový náustek na ústa nebo nos mírným tlakem a odsajte přítomný hlen pomocí odsávačky zatažením za hvězdicovou rukojeť. Poté vyjměte respirátorovou pumpu HK a tlakem na hvězdicovou rukojeť zatlačte píst uvnitř respirační pumpy HK dolů a odsátý hlen vyteče ven. Tento postup opakujte podle vlastního uvážení několikrát, dokud nebude odsáta většina hlenu.

#### **2. Rychlá resuscitace oběhového systému u zvláště obtížných případů porodů telat.**

Proces porodu představuje velkou zátěž pro matku i tele. Při obtížných porodech, způsobených slabými kontrakcemi, nesprávnou polohou plodu nebo příliš velkým teletem, je třeba zajistit rychlou a účinnou resuscitaci a tlak na hrudní koš, který má rozhodující význam pro další vývoj. Vývoj plic a normální začátek dýchání můžete podpořit použitím resuscitační pumpy HK. Pro resuscitaci se zatáhne hvězdicová rukojeť na maximum. Gumový náustek se pak umístí na nos nebo ústa a hvězdicová rukojeť se pomalu stlačí dolů. Tento postup opakujte podle vlastního uvážení.

**Důležité upozornění:** Respirační pumpu HK je třeba po každém použití pečlivě vyčistit a vydezinfikovat. Uchovávejte ji na čistém a suchém místě. Záruku poskytujeme v souladu s našimi všeobecnými záručními podmínkami